



FUTURO™ ELLENBOGEN-BANDAGE

47861DABI, 47862DABI, 47863DABI



**Bietet sofortige Kompression mit
zwei Pelotten für gezielten Druck auf
schmerzende Arme.**

IDEAL FÜR:
Alltägliche Aktivitäten

EIGENSCHAFTEN:

- ① Elastisches 4-Wege-Material verhindert Verrutschen.
- ② Anatomisch geformt für stabilen Halt.
- ③ Umschließender Riemen bietet zusätzliche Kompression.

GRÖSSE:

Artikelnummer	Größe	PZN	CM
47861DABI	S	06440094	22.9-25.4
47862DABI	M	07631985	25.4-27.9
47863DABI	L	07631991	27.9-30.5



Wird um das Ellenbogengelenk gemessen.



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Ellenbogen und Unterarmen.

Zusammensetzung: Nylon, Silikonkautschuk, Polyester, Elasthan.


Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

TRAGEANWEISUNG:



Ziehen Sie die Bandage über den Ellenbogen.

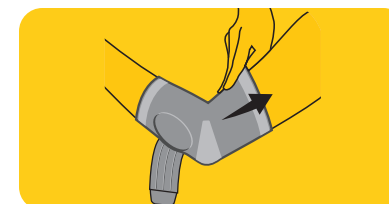

Richten Sie die Pelotten so aus, dass sie an der Ober- und der Unterseite des Unterarms (Speiche und Elle) knapp unter dem Ellenbogen anliegen.



Legen Sie das Band um den Unterarm. Spannen Sie das Band so, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
www.futuro.de

